



PRE-SEED lubricante personal, "respetuoso con la fertilidad"

Prácticamente todas las mujeres experimentarán sequedad vaginal en algún momento de su vida, lo cual puede causar pérdida de confort durante el coito. Para mujeres que están intentando concebir (TTC) la frecuencia de sequedad vaginal puede incrementarse dado que las parejas pasan de "hacer el amor" a "hacer un bebé" ajustándose un calendario alrededor del periodo fértil de la mujer. Desafortunadamente, los lubricantes de uso diario pueden dañar el esperma y no deben usarse cuando estás preparándote para concebir.

Pre-seed lubricante personal no es tóxico para el esperma. Libera de la sequedad vaginal sin dañar el esperma. Su textura única, isotónica, está equilibrada para encajar con el moco cervical del periodo fértil que se secreta de forma normal en el momento de la ovulación. Pre-seed se deposita dentro de la vagina, imitando el moco natural y puede añadirse externamente para incrementar la lubricación.

Envase tubo de 40 gramos multi-uso con aplicadores

**USO PERSONAL:** Pre-seed suplementa la lubricación personal de los fluidos naturales para hidratar, disminuir la fricción y ensalzar el confort en las relaciones sexuales. Pre-seed es de uso seguro en parejas que están intentando concebir y debe ser aplicado en la vagina o pene para lubricar e hidratar. Es compatible con el látex y poliuretado de los profilácticos.

Instrucciones de uso externo:


Aplique una pequeña cantidad de Pre-seed (del tamaño de una cucharilla de café) en la punta de los dedos y póngaselo en la zona genital. La cantidad puede variar en función de la hidratación que desea alcanzar.

**Los ingredientes suaves de Pre-seed requieren que aplique un poco más de cantidad inicialmente con respecto a otros productos de este tipo, para saturar la piel y asegurar una lubricación más duradera**

1.- quite el precinto del tubo antes de usar

2.- Pre-seed puede ser aplicado unos 10-15 minutos antes del coito. Esto permite la hidratación de la zona y su expansión en la vagina lo que facilita más espontaneidad para usted como pareja.

3.- Coloque el aplicador sobre el tubo de Pre-seed enroscándolo firmemente. (vease imagen)

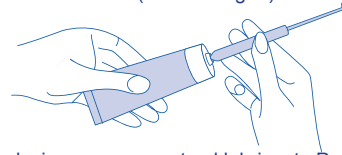


4.- Introducir generosamente el lubricante Pre-seed en el aplicador hasta que esté lleno o hasta alcanzar la cantidad deseada. Muchas mujeres eligen la línea de 2-3mg. Separe el aplicador del tubo. Asegurese de que el aplicador tiene el extremo abierto hacia arriba para que el producto no se salga del mismo. Después de cada uso coloque de nuevo la tapa y empuje el tubo desde el fondo.

5.- Después de cada uso, tape de nuevo y empuje el contenido desde el final del tubo. No deje el tubo abierto.

6.- No almacene Pre-seed en el aplicador más de 30 minutos antes de su uso. Esto significa que si usted rellena el aplicador y no inserta Pre-seed en la vagina en 30 minutos siguientes debe descartar esa dosis y también el aplicador.

7.- Para aplicar Pre-seed, inserte el aplicador en la parte profunda de la vagina. Esto se puede hacer de pie, tumbada o sentada (como en el inodoro). Si el aplicador es difícil de insertar, retire hacia la vulva, abra y redireccione hacia el centro de la vagina. Generalmente esto significa enfocar el aplicador más hacia la parte posterior para insertarlo. También puede aplicar Pre-seed con sus dedos directamente en el exterior de sus genitales para ayudar a la inserción.

8.- Sosteniendo el aplicador presione el émbolo para depositar el lubricante en la vagina (vease imagen).

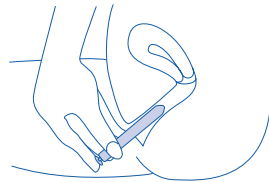

9.- retire ambas partes del aplicador de la vagina.

10.- Descarte el aplicador para otro uso. **NO REUTILICE LOS APLICADORES.**

• Si este método de aplicación no confiere suficiente hidratación, le sugerimos que aplique Pre-seed en la vagina (como se muestra) mientras esté tumbada en la cama. **INMEDIAMENTE** antes del coito. También puede poner un poco de lubricante en la punta de los dedos y aplicarla en la parte externa de los genitales.

+ Si este método de aplicación confiere demasiada hidratación,

aplique el producto cuanto más lejos del coito (p.e, hasta 1 hora antes) y aplique menos cantidad.

#### Instrucciones de uso con condón:

Para su uso con condón, aplique Pre-seed directamente desde el tubo. Añada una pequeña cantidad de Pre-seed en el pene antes de poner el condón y luego ponga también sobre la parte externa del preservativo. Para recolección de muestra de semen, sólo se debe usar preservativos de poliuretano.

#### Uso individual cuando se quiere concebir:

Consulte a su ginecólogo si no se ha quedado embarazada antes de 6 meses de uso de este producto.

Datos de calidad:

Test pH	especificación 7.0-7.4
Osmolaridad (concentración de iones)	260 mOsm-370mOsm
Endotoxinas Mediante el método LAL	registradas
Biocompatibilidad en ensayos sobre ratón	1-celula MEA > 80% exp. blastocistos a las 96 horas

Biocompatibilidad con movilidad del esperma

Movilidad del esperma después de 30 minutos de exposición a una solución de lubricante al 10% dio resultados de 80% o más respecto del esperma no expuesto (el ensayo sobre endotoxinas de embriones de ratón (MEA) y la motilidad de esperma disponen de un Certificado de Análisis que está disponible si se solicita.

#### Ingredientes:

Agua purificada, Hidroxietilcelulosa, Cloruro Sódico, Fosfato Sódico, Carbómero, Metilparabeno, Hidróxido Sódico, Arabinogalactano, Fosfato Potásico, Propilparabeno.

**GARANTIA DE DEVOLUCION :** Si por alguna razón no te gusta Pre-seed, por favor devuélvalo con el justificante de pago y se le abonará el importe del producto.

Para ello deberá devolver el envase original, con el producto restante y el recibo original.

Por favor, adjunto un papel a parte indicando el motivo de devolución, su nombre y dirección. Envíelo a: INGfertility customer service, 5915S, Suite 211, Spokane, WA 99223..

Esta oferta es sólo válida para Estados Unidos..

Si el envío no se hace en estos términos se le devolverá el paquete. Si todo es correcto se le reintegrará el importe en unas 8 semanas

#### ADVERTENCIAS:

- Pre-seed no es un método contraceptivo. No daña el esperma y no interfiere en su función.  
- Manténgalo fuera del alcance de los niños.  
- No lo utilice si el precinto de seguridad está roto. Devuélvalo a su proveedor  
- Pre-seed es muy resbaladizo. Limpie bien cualquier gota que haya caído.  
- No lo utilice si tiene infección o algún trauma vaginal.  
- No usar fuera de fecha de caducidad. La fecha de caducidad se

encuentra en la parte inferior del envase y en el envase exterior (4-año y 2-mes)

#### PRECAUCIONES:

Si la aplicación de Pre-seed causa irritación o discomfórt suspenda su uso inmediatamente, si los síntomas persisten consulte con su médico..

#### IMPORTANTE:

Los aplicadores son de un solo uso. Deséchelos correctamente en la basura. **NO LOS REUTILICE.** Si necesita más lubricación utilice un nuevo aplicador o use la mano.



Almacenar a temperatura ambiente (15°C-30°C).

No existen datos de pacientes disponibles que reflejen embarazos o partos por el uso de este producto.

Visítanos en [preseed.com](http://preseed.com) para saber más.

Fabricado en Estados Unidos y distribuido por INCFertility Spokane WA 8884717333. Patentes de Estados Unidos: 7.83.509; 6.593.309 & 3.140.121 y otra patentes internacionales



[www.mba-gbm.com](http://www.mba-gbm.com)  
+44



Pt. 7-308 020912